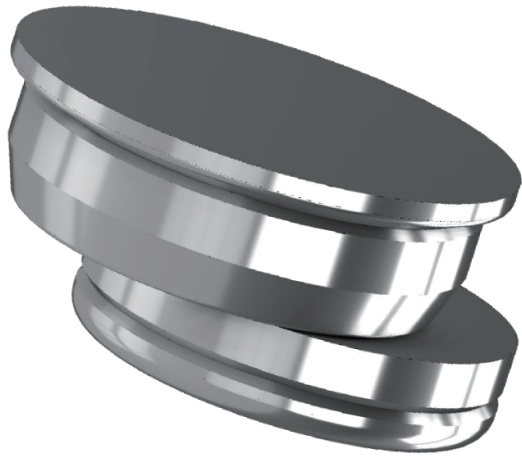


歯科用精密磁性アタッチメント

# マグフィット® M

製品特徴

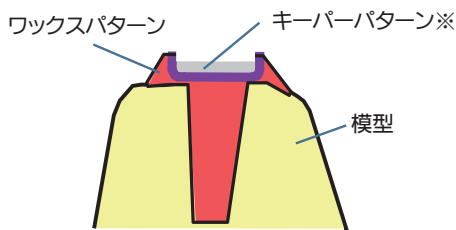
- ① 維持溝+オーバルウィングによる義歯固定
- ② マグフィット®初のダイレクトボンディング対応
- ③ マグフィット®の品質と信頼



【症例】  
総義歯例


ダイレクトボンディング法ステップ

STEP 1 : ワックスアップ



模型上でキーパーパターンの位置を決め、ワックスアップ作業を行う  
※別売の「キーパーパターンM1」をご購入ください。

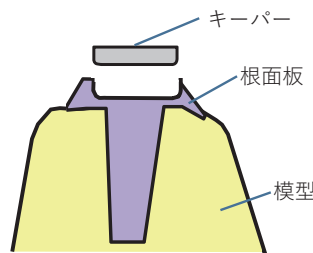STEP 2 : キーパー接着



鑄造後に根面を酸洗し、研磨仕上げなどを行ない、キーパーをレジンセメント等にて接着



キーパーを接着した状態

STEP 3 : 根面合着



支台歯へセメント合着

STEP 4 : 磁石スペース確保



磁石を位置決めした後、義歯を口腔内に装着し、磁石との間のスペースを確保

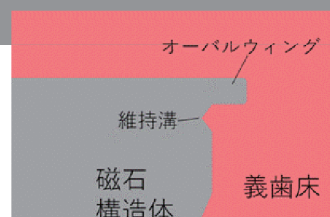
STEP 5 : 磁石合着



磁石の合着は、義歯の調整が完了した1~2週間後に行う

マグフィットM【特徴】

マグフィットMは、維持溝だけではなく、マグフィットDXのオーバルウィングを併用し、義歯からの脱落防止を図っています。









■ マグフィット説明用模型

マグフィットの患者様への説明用模型です。



商品コード	750-80100
品名	クリスタル模型
標準価格	5,000円

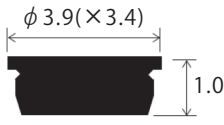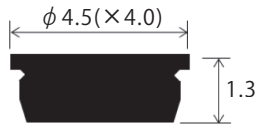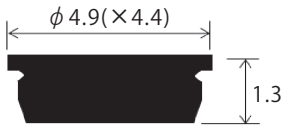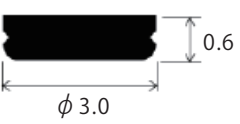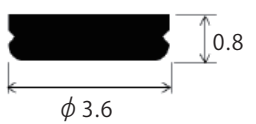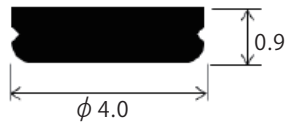※本品のキーパーは鑄接可能ですが、医療保険の術法は合着法のみとなります。保険の施術には合着法を適用してください。

仕様		マグフィットM 400	マグフィットM 600	マグフィットM 800
製品		マグフィットM 400	マグフィットM 600	マグフィットM 800
吸引力		400gf	600gf	800gf
磁石構造体高さ		1.0mm	1.3mm	1.3mm
キーパー直径		φ 3.0mm	φ 3.6mm	φ 4.0mm
各部寸法	磁石構造体	 商品コード: 750-60001 商品名: 磁石構造体単品(1イリ) M400-T	 商品コード: 750-60002 商品名: 磁石構造体単品(1イリ) M600-T	 商品コード: 750-60003 商品名: 磁石構造体単品(1イリ) M800-T
	キーパー	 商品コード: 750-60011 商品名: キーパ単品(1イリ) 400gfタイプ M400-K	 商品コード: 750-60012 商品名: キーパ単品(1イリ) 600gfタイプ M600-K	 商品コード: 750-60013 商品名: キーパ単品(1イリ) 800gfタイプ M800-K
キーパーパターン		商品コード: 750-60021 商品名: キーパーパターンM1 (2イリ) M400-K用	商品コード: 750-60022 商品名: キーパーパターンM1 (2イリ) M600-K用	商品コード: 750-60023 商品名: キーパーパターンM1 (2イリ) M800-K用

## FAX用 注文書

電話  
番号

FAX  
番号

注文書  
記入日

ご使用  
予定日

診療所名

ご芳名

〒  
ご住所

都道  
府県

市区  
郡

メールアドレス

商品コード 750-60001	商品名 マグフィット M 磁石構造体単品 (1イリ) M400-T	注文数
商品コード 750-60002	商品名 マグフィット M 磁石構造体単品 (1イリ) M600-T	注文数
商品コード 750-60003	商品名 マグフィット M 磁石構造体単品 (1イリ) M800-T	注文数
商品コード 750-60011	商品名 マグフィット M キーパ単品 (1イリ) 400gf タイプ M400-K	注文数
商品コード 750-60012	商品名 マグフィット M キーパ単品 (1イリ) 600gf タイプ M600-K	注文数
商品コード 750-60013	商品名 マグフィット M キーパ単品 (1イリ) 800gf タイプ M800-K	注文数
商品コード 750-80100	商品名 クリスタル模型	注文数
商品コード	商品名	注文数

備考

右記QRコードでスマホから  
もご注文いただけます▶



※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。表示価格は全て消費税別、希望小売価格となります。メールアドレスは楷書で、-、\_、!と、。と0など区別しにくい文字はフリガナをお願いいたします。

一般的名称: 歯科用精密磁性アタッチメント 販売名: マグフィットM 認証番号: 21200BZZ00089000 管理医療機器  
 一般的名称: 歯科用パターン成形品 販売名: マグフィットキーパーパターンM1 届出番号: 23B1X10004000006 一般医療機器  
 機能区分コード: 磁石構造体 B00606901、キーパー B00606902

ご注文は  
24時間受付

FAX: 03-5850-8505

●ご記載いただいた個人情報は、弊社の商品情報、講習会案内やご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。 <http://www.itx.co.jp>

販売元



株式会社 インプラテックス  
いつも、となりに

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル  
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp



メール配信登録で  
セミナーご優待!!

メールニュース配信登録は  
QRコードから登録フォーム  
にお入りください。▶



製造販売元

愛知製鋼株式会社 愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地

22/03\_15K