

# MIパンチ (10入) 前歯部用 臼歯部用

より安全で、低侵襲なインプラント手術のために開発された歯肉用パンチです。

インプラント手術時の口腔内での操作性、使いやすさを追究したティッシュパンチです。

前歯部用と臼歯部用の2タイプから選択でき、高い操作性が要求される口腔内で使い分けが可能です。臼歯部用は、刃の全長を臼歯の高さに合わせ、ハンドルも短くすることで、狭い空間での操作性を向上させています。

また、ハンドル上部にテーパ形状の穴を開けており、パンチを回転させる際に練成充填器などを当てて安定させることが可能です。

前歯部用は、全長、ハンドルとも臼歯部用より長くし、広いスペースでの使用に適した形状となっています。



MIパンチ  
前歯部用

MIパンチ  
臼歯部用

## 仕様

ブレード材質: ステンレス鋼  
滅菌:  $\gamma$ 線滅菌済 / ディスポーザブル(単回使用)  
数量: 10個入り

## 前歯部用

商品コード 490-73753  
品名 MIパンチ前歯部用3.5 10個入り  
直径 3.5mm  
標準価格 5,000円

商品コード 490-73754  
品名 MIパンチ前歯部用4.0 10個入り  
直径 4.0mm  
標準価格 5,000円

商品コード 490-73755  
品名 MIパンチ前歯部用4.5 10個入り  
直径 4.5mm  
標準価格 5,000円


## 臼歯部用

商品コード 490-73757  
品名 MIパンチ臼歯部用4.0 10個入り  
直径 4.0mm  
標準価格 5,000円


商品コード 490-73758  
品名 MIパンチ臼歯部用4.5 10個入り  
直径 4.5mm  
標準価格 5,000円

商品コード 490-73759  
品名 MIパンチ臼歯部用5.5 10個入り  
直径 5.5mm  
標準価格 5,000円


## 使用例

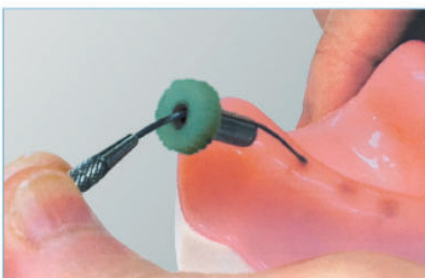

1. MIパンチを器具に通し、センターの位置を決めます。

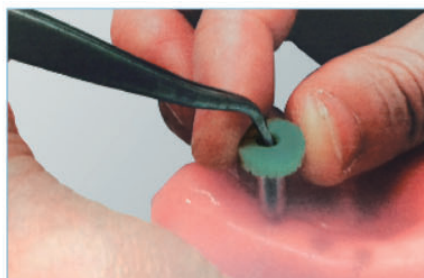

2. 器具を上部の穴に入れてMIパンチを押さえます。


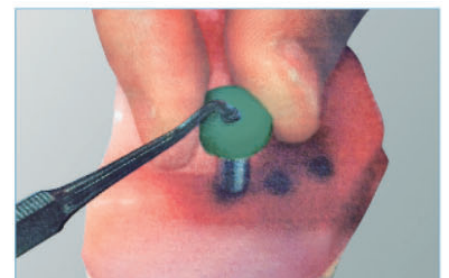


3. 器具で安定させながら手で回して切ります。

口腔内用ティッシュパンチ

# MIパンチ (10入)

## サイズ

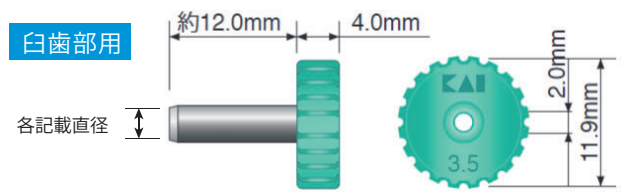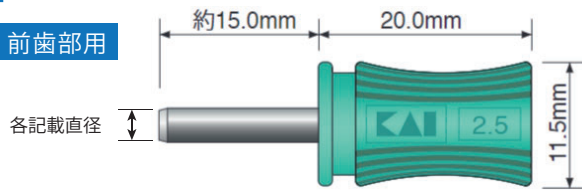

## 注文書

電話  
番号

FAX  
番号

注文書  
記入日

ご使用  
予定日

診療所名

ご芳名

〒

ご住所

都道  
府県

市区  
郡

E-mail

※楷書でご記入ください。-と、IとL、oと0など区別しにくい文字にはフリガナをお願いいたします。

商品コード	品名	直径	標準価格	数量
490-73753	MIパンチ前歯部用3.5 10個入り	3.5mm	5,000円	数量
490-73754	MIパンチ前歯部用4.0 10個入り	4.0mm	5,000円	数量
490-73755	MIパンチ前歯部用4.5 10個入り	4.5mm	5,000円	数量
490-73757	MIパンチ臼歯部用4.0 10個入り	4.0mm	5,000円	数量
490-73758	MIパンチ臼歯部用4.5 10個入り	4.5mm	5,000円	数量
490-73759	MIパンチ臼歯部用5.5 10個入り	5.5mm	5,000円	数量

備考欄

ご注文は  
24時間受付

FAX:03-5850-8505

※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。また、表示価格は消費税別、希望小売価格となります。●ご記載いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用いたします。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。www.itx.co.jp

販売元



〒116-0013東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル  
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp  
お電話でのお問合せは土・日・祝祭日除く9:00~17:00にお願いいたします。



メール配信登録で  
セミナーご優待!!

弊社メールニュースの  
配信登録はQRコード  
から登録フォームに  
お入りください。➡



インプラテックス

検索

製造販売元

カイ インダストリーズ株式会社  
〒501-3992 岐阜県関市小屋名1110

お取扱店

商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店へお問合せください。

202402\_10K