

Master-Pin-Control

マスターピン コントロール
メンブレン固定用ピンシステム



開発 : Istvan Urban 教授
Prof. Istvan Urban, DMD, MD, PHD

ハンガリー・ブダペスト開業
セゲド大学 名誉教授 / ミシガン大学 補助臨床准教授 / ロマリダ大学 助教授
インプラント周囲の骨再生や軟組織再建術に関する論文を多数執筆
歯槽堤造成の“ソーセージテクニック”を開発。
ソーセージテクニックは特に水平的骨造成に用いられ、単独歯から複数歯欠損、無歯顎、骨吸収が進んだ上顎前歯部など、適応可能とされる範囲が幅広いテクニックである。

マスターピンコントロールは、特に吸収性、非吸収性、チタン強化メンブレンの固定用に設計されています。
マスターピンはグレード5チタン合金製で、鋭い先端と非常に安定したシャンクにより、緻密な皮質骨に簡単かつ正確に挿入することができます。



画像はイメージです。

セット

商品コード 190-61100

品名 マスターピンコントロール キット
構成 MEISマスターピンホルダー
MEISマスターピンヘキサゴンスクリュードライバー WS0.8
MEIS MPフィクシングホルダー 0.25
MEIS 203RFツイストドリル Ø0.6mm (2イリ)
MEIS 203RFツイストドリル Ø0.8mm (2イリ)
オーガナイザー
標準価格 140,000 円

単品


商品コード 190-00203

品名 MEISマスターピンホルダー
標準価格 30,000 円



商品コード 190-00202

品名 MEISマスターピンヘキサゴンスクリュードライバー WS0.8
標準価格 12,000 円

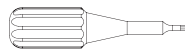

商品コード 190-00204

品名 MEIS MPフィクシングホルダー0.25
標準価格 25,000 円



ブラックコーティング

商品コード 190-00200

品名 MEIS 203RFツイストドリル Ø0.6mm (2イリ)
入数 2入
標準価格 10,000 円



商品コード 190-00201

品名 MEIS 203RFツイストドリル Ø0.8mm (2イリ)
入数 2入
標準価格 10,000 円



商品コード 190-00010

品名 マスターピン(10入)
入数 10入
標準価格 30,000 円



190-00010
マスターピン(10入)

商品コード 190-00011

品名 マスターピン フラットヘッド(10入)
入数 10入
標準価格 30,000 円

共通
ピン直径: 0.95mm
ピン長さ: 2.65mm



190-00011
マスターピン フラットヘッド(10入)

マスターピンの特徴

- 曲がらない、折れない - チタン合金(グレード5)のピンでメンブレンを安全に固定します。
- 軟組織の状況に応じて2種類のピンが用意されています。
- ピンの先端が鋭く、安定性が高いため、皮質骨や角度が付いた際も正確に挿入できます。
- 特別に開発された専用のピンホルダーにより、トレーからの取り外しとピンの装着が容易です。

オプション

商品コード 190-07040

品名 MEISデコルケーション用ドリル(2イリ)
入数 2入
標準価格 10,000 円



商品コード 190-40001

品名 マレットHI070
標準価格 19,500 円



Master-Pin-Control

マスターピンコントロール

推奨滅菌条件：高圧蒸気滅菌 121℃ 20 分間 / 134℃ 5 分間


使用方法

ピン=マスターピン


1. 未滅菌品であるので使用前に必ず洗浄し、医療機関内で担保された滅菌条件(上記)にて高圧蒸気滅菌を行う。
2. ピンの挿入位置の骨が硬いなど、必要があればプレドリリングを行う。
3. ピンのヘッドにマスターピンホルダーを上から垂直に押し付け、ピンをホルダー先端にロックする。
4. 顎骨にあてがったピン付きのホルダーを槌打し、ピンを挿入する。
5. ピンホルダーを横に倒してピンをロックから外す。

骨が柔らかい場合など、骨からピンが浮きそうな際は、フィクシングホルダーのコーティングされていない先端をピンホルダー先端のスリットに挿入し、ピンを抑えながらロックを外すことができる(右図)。メンブレンには触れないようにすること。

マスターピン埋入時の操作 (浮きそうな場合)

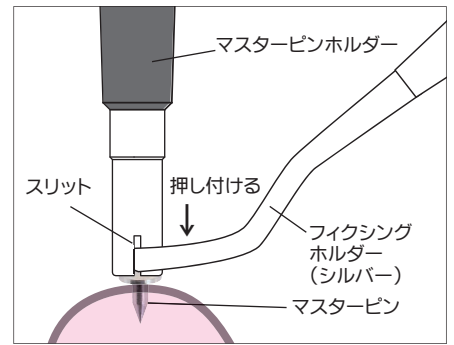

マスターピン除去時の操作

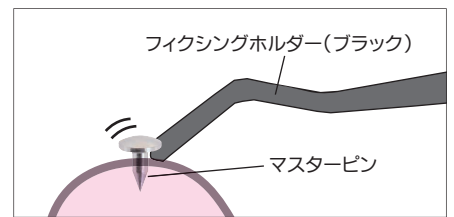

マスターピンの除去

フィクシングホルダーのブラックコーティングされている先端を用いて注意深くピンを緩め、鉗子等で抜去する。ヘキサゴンスクリュードライバーを使用してマスターピンを反時計回りに回転させ、ヘッドを浮かすことができる(フラットヘッドは不可)。

注文書

TEL	FAX	ご使用 予定日	/			
診療所名	ご芳名					
ご住所 〒	都 道 府 県	市 区 郡				
Eメール アドレス						
商品コード	190-61100	商品名	マスターピン コントロール キット	標準価格	140,000円	注文数
商品コード	190-00010	商品名	マスターピン (10入)	標準価格	30,000円	注文数
商品コード	190-00011	商品名	マスターピン フラットヘッド(10入)	標準価格	30,000円	注文数
商品コード		商品名				注文数
商品コード		商品名				注文数

●商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合がございます。表示価格は全て希望小売価格・消費税別となります。●ご注文は所定の用紙にご記入のうえ、インプラテックスまたは 歯科材料店様にご連絡をお願いいたします。●ご注文品の在庫がない場合は、弊社より納期をご連絡いたします。あらかじめご了承をお願いいたします。●配送料は1回のご注文が10,000円未満(税別)の場合、700円(税別)頂戴いたします。時間指定便・航空便等をご利用の際は別途料金が必要となります。●製品の返品は、ご注文の品と異なる場合、または汚損・不良品に限りお受けいたします。弊社にご連絡の上、製品到着後14日以内にご返送ください。(未開封、パッケージ破損のない物に限ります。)

ご注文は **24時間受付** FAX:03-5850-8505

※メールアドレスはPC用のアドレスをご記入ください。携帯電話のアドレスはご遠慮ください。●ご記載いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。www.itx.co.jp

製造販売元
/発売元

IMPLATEX
ITX 株式会社 **インプラテックス**
いつも、となりに

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp
お電話でのお問合せは土・日・祝祭日を除く9:00~17:00にお願いいたします。

メール配信登録で
セミナーご優待!!

メールニュース配信登録は
QRコードから登録フォーム
にお入りください。➡



製造元

MEISINGER
GERMANY

お取扱店

※商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店へお問合せください。

2025.4