


骨採取および骨破碎システム K-トレフィンRB

トレフィンスリーブで骨採取し、インナードリルで採取骨を同時に破碎します。また、インプラント埋入窩の形成時に使用すると自家骨を無駄なく採取できます。

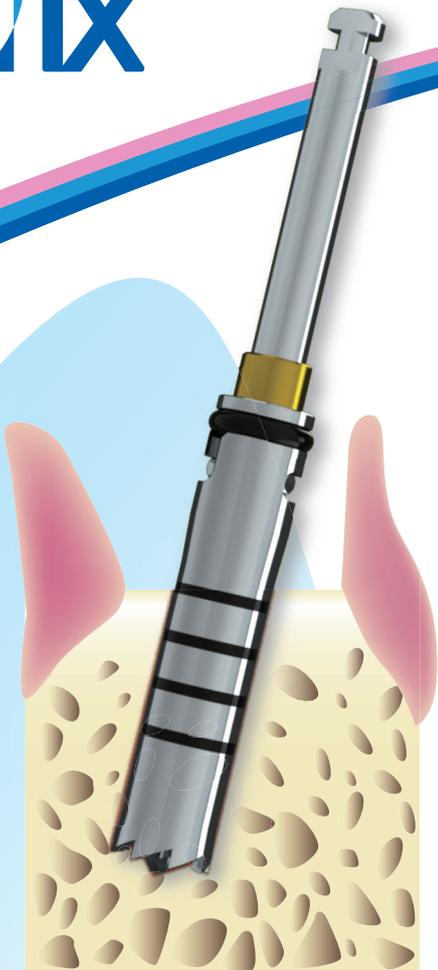

商品コード 310-16000

K-トレフィン RB 3.2mm

商品コード 310-16002

K-トレフィン RB 3.7mm

商品コード 310-16001

K-トレフィン RB 4.2mm

各24,000円 (税別)

インナードリル

①
凸部をトレフィンスリーブの溝に入れしっかりと固定する。

ロックする

トレフィンスリーブ

②
コントラアングルに装着し、注水しながらドナーサイトを穿孔する。

マーキングライン:
5-7-9-11mm

推奨回転数:
上顎 500rpm
下顎 800~1000rpm

プランジャー

トレフィンスリーブ

トレフィンスリーブ内の
インナードリル



弊社 WEB サイト製品ページにて操作動画を掲載しています。

③
インナードリルを取り外し、プランジャーでトレフィンスリーブ内部の破碎された採取骨を押し出す。

破碎された
採取骨

※ 旧タイプのシリンジをお持ちの場合、同径のK-トレフィンRBを装着できます。



※ 旧タイプシリンジ (現在は販売終了) の3.7用はありません。

オプション

脱着作業はドライバー (オプション) の使用が便利です。

商品コード 003-C9141

3mm ヘックスドライバー

標準価格 16,000円 (税別)



商品写真はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。

商品コード 310-16000

K-トレフィン RB 3.2mm 24,000円 (税別)

・トレフィンスリーブ(φ3.2)



インナードリル(φ3.2)



・専用ブランジャー(φ3.2)



商品コード 310-16002

K-トレフィン RB 3.7mm 24,000円 (税別)

・トレフィンスリーブ(φ3.7)



インナードリル(φ3.7)



・専用ブランジャー(φ3.7)



商品コード 310-16001

K-トレフィン RB 4.2mm 24,000円 (税別)

・トレフィンスリーブ(φ4.2)



・インナードリル(φ4.2)



・専用ブランジャー(φ4.2)



オプション

商品コード 003-C9141

3mm ヘックスドライバー


標準価格 16,000円 (税別)



機器の脱着・操作に便利です。

使用方法

- ① トレフィンスリーブをインナードリルにしっかりと装着します。この時、インナードリルのシャンク部にオプションのドライバーを使用すると作業がしやすくなります。
- ② インナードリルのシャンク部をコントラハンドピースに装着します。
- ③ 外部注水にて冷却しながらドリリングを行います。
(推奨回転数: 上顎:500rpm、下顎:800~1000rpm)
この時、トレフィンスリーブの全周が骨内に入るようにしてください。フラットドリルが骨を破碎しながら穿孔していきます。
- ④ 希望の深さまで穿孔したら穿孔作業を終了し、シャンク部をコントラハンドピースから取り外します。
- ⑤ 粉碎骨が収納されているトレフィンスリーブからインナードリルを抜き取ります。この時、インナードリルのシャンク部にオプションのドライバーを使用すると作業がしやすくなります。
- ⑥ ブランジャーを使って粉碎骨をトレフィンスリーブから押し出します。この時、ブランジャーのシャンク部にオプションのドライバーを使用すると作業がしやすくなります。

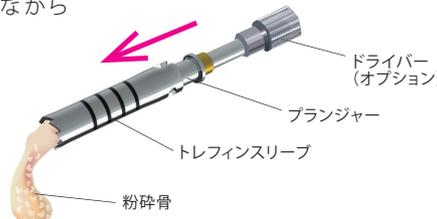

販売名:K-トレフィンRB 一般的名称:手術用クラウンドリルビット 一般医療機器 届出番号:13B2X00094000205 販売名:レンチ 一般的名称:手術用レンチ 一般医療機器 届出番号:13B1X00053AD0007

注文書

電話番号 _____ FAX番号 _____ 注文書記入日 _____ 日/月/年

〒 _____ 都道府県 _____ 市区郡 _____

メールアドレス * _____

※FAXをお持ちの場合は必ずご記入ください。

診療所名 _____ ご芳名 _____

〒 _____ 都道府県 _____ 市区郡 _____

商品コード	商品名	価格	注文数
310-16000	K-トレフィン RB 3.2mm	24,000円	
310-16002	K-トレフィン RB 3.7mm	24,000円	
310-16001	K-トレフィン RB 4.2mm	24,000円	
003-C9141	3mmヘックスドライバー	16,000円	

※商品の規格・仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。表示価格は全て消費税別、希望小売価格となります。

ご注文は24時間受付 FAX:03-5850-8505

※メールアドレスはPC用のアドレスをご記入ください。携帯電話のアドレスはご遠慮ください。●ご記載いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。http://www.itx.co.jp

販売元 IMPLATEX 株式会社 インプラテックス

〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp

インプラテックス 検索



ご登録でセミナー優待!! implatex-news@itx.co.jp

「配信希望」と送信ください。弊社セミナーのご優待情報・商品情報等をご案内いたします。



お取扱店