

用途とテクニックを拡充! 新インサートチップのご案内

ピエゾサージェリー® は骨の切削面のダメージを抑え、効果的に硬組織を形成します。
このたび Mectron 社 Piezosurgery® 専用インサートチップに新たな製品が追加され、用途がさらに広がりました。
従来のラインナップと合わせ約 100 種類の選択肢で、幅広い症例に対応します。



クリスタルアプローチ用チップ


水圧による上顎洞底粘膜拳上チップ

商品コード 140-10100


インサートチップOT11 標準価格:28,000円(税別)




φ3.0mm
ダイヤモンド粒子サイズ151μm

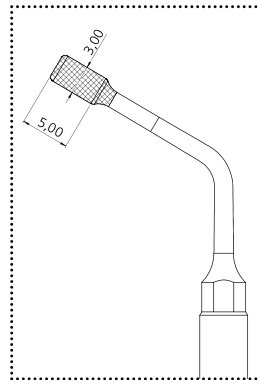

【OT11の使用法】

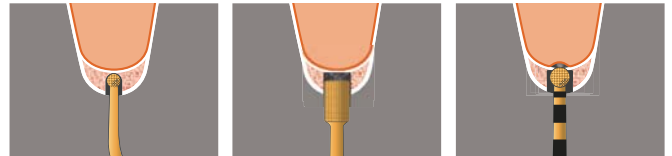


① OT5 - 上顎洞底骨付近まで穿孔する。

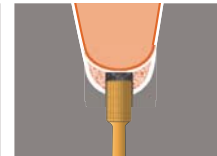


② OT11 - 洞底骨付近までφ3mmの骨孔を形成する。



③ OT9 - 洞底骨を穿孔し、上顎洞内に穿通させる。

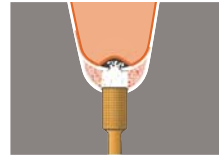


④ アプリケーターを使用し、骨補填材を填入する。
OT11 - 填入された骨補填材を押し込む。

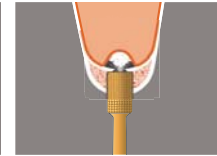

⑤ OT11 - 骨補填材と共に、チップ先端からの水流と共に流し込む。



⑥ OT5 - 洞底骨(削り残ったボーンリング)を削除する。

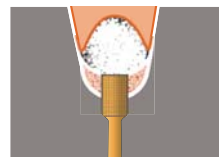

⑦ OT11 - 填入された骨補填材と共に、チップ先端からの水流と共に押し流し込む。必要な量の骨補填材が洞底内に填入されるまで、前の操作を繰り返す。



⑧ 通法に従いインプラントを埋入する。



骨膜剥離用チップ


骨膜剥離時に使用

商品コード 140-15610

インサートチップPR1 標準価格:18,500円(税別)



先端最大幅4mm

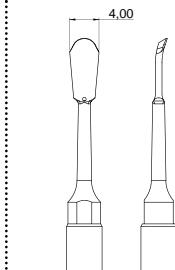


商品コード 140-15620

インサートチップPR2 標準価格:18,500円(税別)



先端最大幅5mm

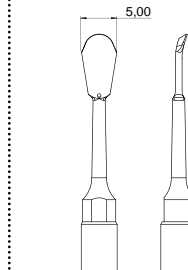


ピエゾサージェリーに関する詳細はこちらへ


※臨床レポート、動画等を閲覧いただけます。

骨切り用チップ サーキュラーソーの薄いタイプ

商品コード 140-10101
インサートチップOT12
 刃部厚み0.35mm
 標準価格:27,000円(税別)

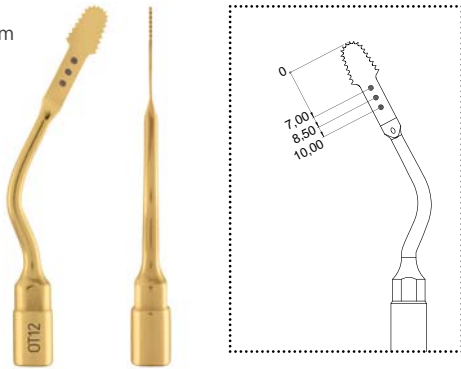

商品コード 140-10102
インサートチップOT12S
 刃部厚み0.25mm
 標準価格:27,000円(税別)

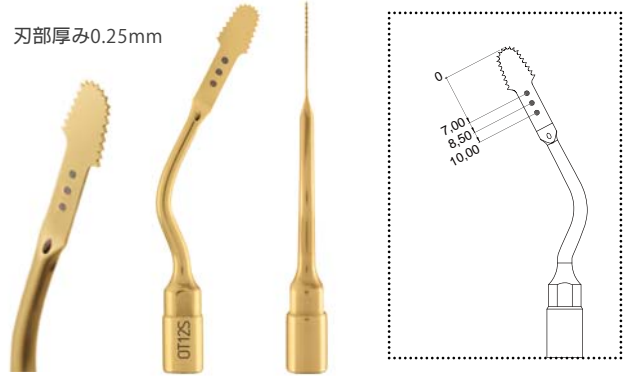

インプラント窩形成用チップ

マーキングライン: 7-8.5-10-11.5-13-13.5mm (共通)

中間サイズを追加ラインナップし、さらに骨密度や、埋入するインプラント径にマッチしたインプラント窩形成を可能にします。



◎上記は今回の追加サイズです。他にφ2.0、φ3.0、φ4.0がラインナップされています。

承認番号:224ALBZX00012000

注文書

電話
番号

FAX
番号
※FAXをお持ちの場合は必ずご記入ください。

注文書
記入日

ご使用
予定日

診療所名

ご芳名

〒 - 都道 市区
 ご住所 府県 郡

商品コード	商品名	注文数

ご注文は
24時間受付

FAX:03-5850-8505

●ご記載いただいた個人情報については、弊社の商品情報、講習会等のご案内ならびにご注文の商品発送に利用させていただきます。弊社の個人情報方針の詳細は、インプラテックスのホームページをご参照ください。
<http://www.itx.co.jp>

製造販売元
/発売元



いつも、となりに
 〒116-0013東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp
 お電話でのお問合せは土・日・祝祭日除く9:00~17:00にお願いいたします。

インプラテックス

検索

歯科器具・インプラント材料・セミナー



お取扱店

※商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店へお問い合わせください。 2016-01

製造元

