



Swish™ System

スウィッシュシステム

待望の
ティッシュレベル
タイプが新登場

2017年11月新発売!

SwishPlus™
スウィッシュプラス
エステティックレベル



RN
Octa



WN
Octa

SwishTapered™
スウィッシュテーパード
ティッシュ / ボーンレベル



エステティックレベルで埋入される「スウィッシュプラス」 ティッシュレベル・ボーンレベル埋入に対応できる「スウィッシュテーパード」

Implant Direct社の「スウィッシュプラス」および「スウィッシュテーパード」インプラントを発売いたします。
この2つのティッシュレベルタイプのインプラントシステムは、それぞれに外科的に多くの共通性を持ちながら最新コンセプトを取り入れたボディ形状です。アバットメントとの接合様式は共にインターナルオクタゴンで、補綴的にも互換性を持っています(3.7mmプラットフォームは除く)。6mmLショートサイズを含む豊富なラインナップで、様々な場面での対応が可能です。

共通で互換性のあるプラットフォーム

Hex 3.7mmD ●
プラットフォーム



RN Octa 4.8mmD ●
プラットフォーム



WN Octa 6.5mmD ●
プラットフォーム




SwishPlus™

スウィッシュプラス

SBM

ブラスティング


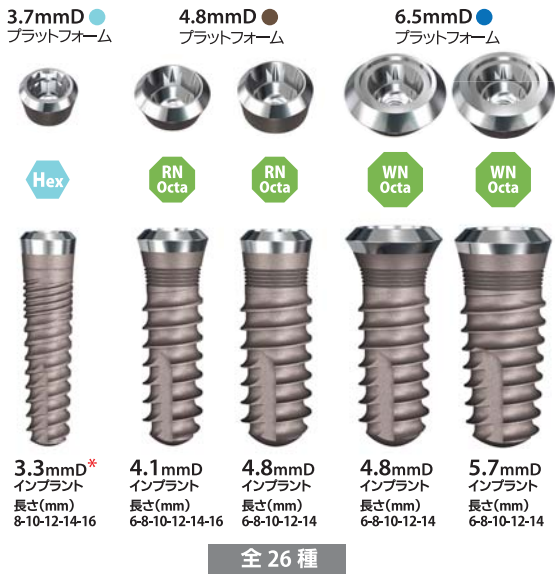


埋入時、骨を拡大し初期固定に有利な次第に深くなるシングルリードスレッド、セルフタップ埋入を容易にする2本のカッティンググループ、インプラント周囲の骨吸収を抑えるマイクログループをネック部の下に有したボディ形状で、初期固定性、操作性、安定性を高めています。ネック部の機械加工面の高さは1mmで、深めに埋入される審美的に有利な埋入(エステティックレベル)プロトコルが適用されます。


特徴

- ・ネック部機械加工面の高さは1mmで、ティッシュレベルインプラントとしては審美的に有利(エステティックレベル埋入)。
- ・ネック部の下に、インプラント周囲の骨吸収を抑えるマイクログループを付与*。
- ・次第に深くなるシングルリードスレッドは初期固定性を増大させる*。
- ・埋入操作を容易にする2本のカッティンググループ。
- ・接合部の強度を高めるダブルインターナルヘックスの採用により、狭小骨での歯冠幅径を抑えた審美的の高い補綴が可能(3.3mmDインプラント)。
- ・4mmスクエア及びオクタゴン仕様のラチェットが使用できるキャリアー/トランスファーを採用。
- ・インターナルオクタゴン/ヘックスの面部の位置関係も把握できるカラーコード化されたキャリアー/トランスファー。
- ・カバースクリー、2mmHエクステンダー、キャリアー/トランスファーを含むオールインワンパッケージ。

* 3.3mmDインプラントはスウィッシュテーパーD 3.3mmDインプラントと同じスレッドパターン。

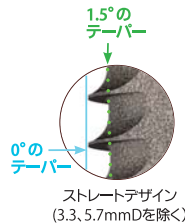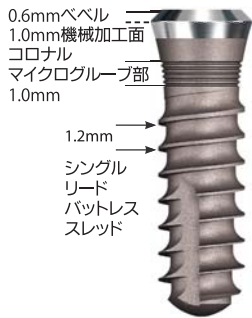

スウィッシュプラス パッケージ

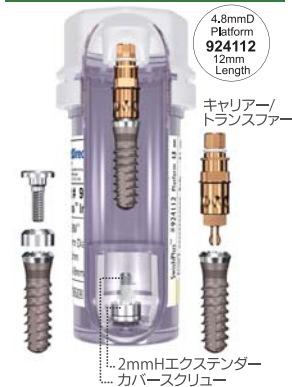


⚠ スウィッシュプラスインプラントの埋入位置は、上記長さより1mmL 深く埋入

SwishTapered™

スウィッシュテーパーD

SBM


ブラスティング

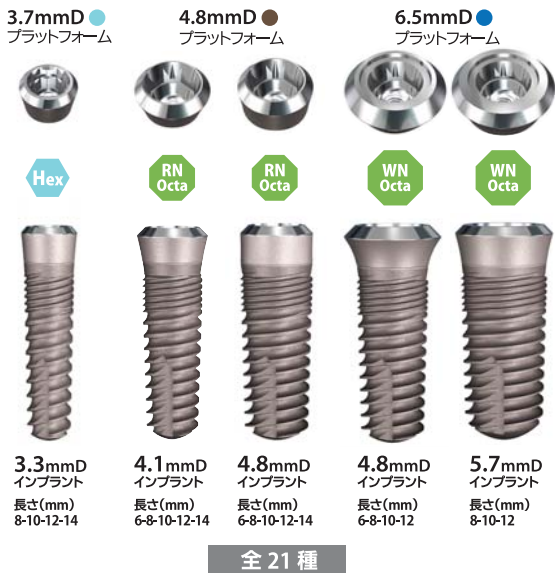

埋入時、骨を拡大し初期固定に有利な次第に深くなるダブルリードスレッドのテーパーボディ、セルフタップ埋入を容易にする2本のカッティンググループ、インプラント周囲の骨吸収を抑えるマイクロスレッドをネック部の下に有したボディ形状で、初期固定性、操作性、安定性を高めています。必要に応じ、ボーンレベルインプラントとしても対応するプロトコルが用意されています。

特徴

- ・ティッシュレベル、またはボーンレベルで埋入できる2mmの軽度の粗造面(SBMライトプラストサーフェス)ネック部。
- ・ネック部の下に、インプラント周囲の骨吸収を抑えるマイクロスレッドを付与。
- ・柔らかい骨質を拡大するテーパーボディ。
- ・次第に深くなるダブルリードスレッドは埋入速度を速め、初期固定性を増大させる。
- ・埋入操作を容易にする2本のカッティンググループ。
- ・接合部の強度を高めるダブルインターナルヘックスの採用により、狭小骨での歯冠幅径を抑えた審美的の高い補綴が可能(3.3mmDインプラント)。
- ・4mmスクエア及びオクタゴン仕様のラチェットが使用できるキャリアー/トランスファーを採用。
- ・インターナルオクタゴン/ヘックスの面部の位置関係も把握できるカラーコード化されたキャリアー/トランスファー。
- ・カバースクリー、2mmHエクステンダー、キャリアー/トランスファーを含むオールインワンパッケージ。

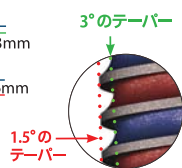

スウィッシュテーパーD パッケージ



※弊社では上記スウィッシュシステムの他に、インタラクティブ、スウィッシュアクティブ、レガシーシステムもラインナップしております。詳細はお問合せください。

製造販売元



いつも、となりに
〒116-0013東京都荒川区西日暮里2-33-19 YDM日暮里ビル
TEL.03-5850-8555 FAX.03-5850-8505 www.itx.co.jp
お電話でのお問合せは土・日・祝祭日除く9:00~17:00にお願いいたします。

歯科器具・インプラント材料・セミナー

インプラテックス

検索

Facebook はじめました。



製造元



(米国)

お取扱店

承認番号: 22800BZ100024000、22700BZ100018000

※商品の詳細は(株)インプラテックス、またはお取扱店までお問合せください。

2017.11/26K